



## MODE D'EMPLOI - DAISYGRIP

**Application** - Daisygrip est un garrot réutilisable, spécialement conçu pour simplifier la collecte de sang.



**Application:** La serrure du garrot est magnétique et s'ouvre facilement. Placez le garrot 5 à 10 cm devant l'endroit où vous effectuez le prélèvement de sang.



**Le prélèvement de sang:** Contrôlez d'abord la position correcte auprès du patient. Resserrez le garrot. Le pouls doit rester palpable.



**Réduction de la tension:** Déplacez le clip vers le haut pour réduire la tension.



**Déconnecter:** Réduisez la tension. Ouvrez le garrot verticalement.



**Nettoyage et désinfection:** Nettoyez et désinfectez le garrot selon le protocole de l'hôpital

## Sécurité

- Avant et après utilisation, désinfectez le garrot pour prévenir la transmission des micro-organismes
- Faites attention lorsque vous resserrez/ouvrez le garrot
- Plage de température: 5°C - 50°C
- Ne pas stériliser le garrot par la chaleur
- Jetez le garrot en cas d'usure visible
- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
- Sans latex

Matériel: La fermeture: Polypropylène (ExxonMobil™ PP9074MED)

Le garrot: Silicone (DIN ISO 10993)