

MODE D'EMPLOI

1.

Application

La serrure du garrot est magnétique et s'ouvre facilement. Placez le garrot 5 à 10 cm devant l'endroit où vous effectuez le prélèvement de sang.

Placez un index entre le garrot et la peau pour éviter les pincements.



2.

Réduction de la tension, Déconnecter

Déplacez le clip vers le haut pour réduire la tension.

Ouvrez le garrot en faisant glisser les deux parties de la serrure sur le côté.



3.

Nettoyage et désinfection



Nettoyez et désinfectez le garrot selon le protocole de l'hôpital.